

検査内容変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目を変更しますのでご案内いたします。

記

■実施日 令和4年5月2日(月) ご依頼分より

■変更項目

総合検査案内頁	検査項目	総合検査案内頁	検査項目
66	アデノウイルスDNA定性	33	MHPG
67	水痘・帯状疱疹ウイルスDNA(VZV)定性		カテコールアミン3分画 A: アドレナリン NA: ノルアドレナリン DA: ドーパミン
	単純ヘルペスウイルスDNA定性		ドーパミン総
	ヒトヘルペスウイルス6型DNA定性		
	ヒトヘルペスウイルス7型DNA定性		
75	サイトメガロウイルスDNA定性	92	γ-アミノ酪酸(GABA)

詳細については、次頁以降をご参照ください。

■変更内容

総合 検査 案内 頁	項目 コード	検査項目	変更内容	新	現	変更 理由		
66	3178-24	アデノウイルス DNA定性	結膜ぬぐ い液の 容器	容器 記号 S 滅菌 ポリス ピッツ		容器 記号 h SDS EDTA -2Na 入り		外注先の 運用変更 に伴う 容器変更
			保存方法	結膜ぬぐい液：冷蔵	結膜ぬぐい液：室温			
	備考		結膜ぬぐい液： 患部をぬぐった滅菌綿 棒を1mLのPBSまたは 生理食塩水が入った 滅菌ポリスピッツSに 入れてください。					
	3178-54		部分尿 容器	容器 記号 S 滅菌 ポリス ピッツ		容器 記号 ① 滅菌 試験 管		凍結耐性 の容器に 変更

* 現容器は変更後も使用可能です。

総合 検査 案内 頁	項目 コード	検査項目	変更 内容	新	現	変更 理由		
67	3213-23	水痘・带状疱疹ウイルス DNA (VZV) 定性	患部 ぬぐい液の 容器	容器 記号 S 滅菌 ポリス ピッツ		容器 記号 h SDS EDTA -2Na 入り		外注先の 運用変更 に伴う 容器変更
	3196-23	単純ヘルペス ウイルス DNA定性						
	3233-23	ヒトヘルペス ウイルス 6型DNA定性	保存方法	患部ぬぐい液: 冷蔵	患部ぬぐい液: 室温			
	3234-23	ヒトヘルペス ウイルス 7型DNA定性	備考	患部ぬぐい液: 患部をぬぐった滅菌 綿棒を1mLのPBSま たは生理食塩水が 入った滅菌ポリス ピッツSに入れてくだ さい。				
75	3221-23	サイトメガロ ウイルス DNA定性						
67	3213-04	水痘・带状疱疹ウイルス DNA (VZV) 定 性	髄液	容器 記号 S 滅菌 ポリス ピッツ		容器 記号 ① 滅菌 試験 管		凍結耐性 の容器に 変更
	3196-04	単純ヘルペス ウイルス	髄液					
	3196-37	DNA定性	組織					
	3233-04	ヒトヘルペス ウイルス	髄液					
	3233-37	6型DNA定性	組織					
	3234-04	ヒトヘルペス ウイルス	髄液					
3234-37	7型DNA定性	組織						
75	3221-04	サイトメガロ ウイルス DNA定性	髄液					
	3221-54		部分尿					
	3221-37		組織					

* 現容器は変更後も使用可能です。

総合 検査 案内 頁	項目 コード	検査項目	変更 内容	新	現	変更 理由	
33	2069-04	MHPG	髄液の 容器	容器 記号 S 滅菌 ポリス ピッツ		容器 記号 ⑳ 滅菌 試験 管	凍結耐性 の容器に 変更
	2056-04	カテコール アミン3分画 A:アドレナリン NA:ノルアドレナリン DA:ドーパミン					
	2063-04	ドーパミン総					
92	0093-04	γ-アミノ酪酸 (GABA)					

* 現容器は変更後も使用可能です。